
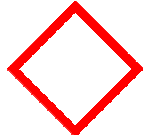



CODICE MAGAZZINO		1074997 (1 L) 1074998 (5 L)	
PRINCIPIO ATTIVO		Ipoclorito di sodio (1,15 g, Cloro Attivo 1,1%)	
NOME COMMERCIALE <sup>1</sup>		GIOCLOR	
INDICAZIONI D'USO		<p>Disinfezione di alto livello (attività tubercolicida, virucida, fungicida e battericida) dei circuiti interni delle macchine per emodialisi.</p> <p>Disinfezione di livello intermedio di dispositivi medico-chirurgici non critici e semicritici.</p>	
MODALITÀ D'USO		<p>Disinfezione macchine per emodialisi: se provviste di programmi automatici basta inserire la lancia di aspirazione nella tanica. Negli altri casi, diluire preventivamente al 5% in acqua deionizzata.</p> <p>Disinfezione dispositivi medico-chirurgici: diluizione consigliata del 5%.</p>	
AVVERTENZE SICUREZZA		<p>Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, possono formarsi gas pericolosi (cloro).</p> <p>Conservare a temperatura ambiente, in un luogo fresco, asciutto, pulito, al riparo da elevate fonti di calore e non esposto alla luce solare diretta.</p> <p>Può causare la decolorazione di alcuni tessuti.</p> <p>La validità della confezione integra è di 24 mesi.</p>	
PITTOGRAMMI DI RISCHIO	 H206		
DPI			
SPANDIMENTO		<p><b>KIT STANDARD</b> Per quantità inferiori al litro</p> <p><b>KIT AVANZATO</b>  Per quantità superiori al litro</p>	

<sup>1</sup> La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.