




CODICE MAGAZZINO		107ES6843		
PRINCIPIO ATTIVO		Ipoclorito di sodio (0,575 g, Cloro Attivo 0,55%)		
NOME COMMERCIALE ¹		GIOCLOR 50 SPRAY		
INDICAZIONI D'USO			Indicato specificatamente per la disinfezione dei set di dialisi peritoneale.	
MODALITÀ D'USO			<p>Prodotto pronto all'uso. Nebulizzare il prodotto, tal quale, direttamente sulla superficie da trattare e, se necessario, distendere la soluzione mediante strofinamento con garza monouso sterile. Lasciare asciugare e non risciacquare. Tempi di contatto: per l'abbattimento di batteri vegetativi e funghi è sufficiente 1 minuto di contatto. Per l'abbattimento di micobatteri e virus sono necessari 15 minuti di contatto.</p>	
AVVERTENZE SICUREZZA			<p>Conservare nel contenitore originale sigillato a temperatura ambiente, in un luogo fresco, asciutto, pulito, al riparo da elevate fonti di calore e non esposto alla luce solare diretta. Non utilizzare il prodotto insieme a prodotti acidi per la possibile emissione di cloro gassoso fino a concentrazioni tossiche. Può provare corrosione dei metalli. Può causare la decolorazione di alcuni tessuti. La validità della confezione integra è di 24 mesi.</p>	
PITTOGRAMMI DI RISCHIO				
DPI	Durante l'uso normale del prodotto non sono necessarie protezioni.			
SPANDIMENTO			<p>KIT STANDARD Per quantità inferiori al litro</p> <p>KIT AVANZATO  Per quantità superiori al litro</p>	

¹ La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.