



CODICE MAGAZZINO		0994832		
PRINCIPIO ATTIVO		Clorexidina digluconato (2,0 g) Alcool isopropilico (70,0 ml)		
NOME COMMERCIALE <sup>1</sup>		GIOCLOREX 2% salvietta		
INDICAZIONI D'USO				<p>Disinfezione dei diversi dispositivi medici e in particolare delle componenti esterne e punti di prelievo dei Cateteri Venosi Centrali (CVC) e periferici.</p> <p>Indicato per l'antisepsi della cute nel punto di inserzione del catetere, per la pulizia e la disinfezione delle porte di iniezione o porzioni esterne del sistema stesso, prima e dopo l'uso di tali accessi.</p>
MODALITÀ D'USO				Con la salvietta monouso già imbevuta, strofinare la superficie del dispositivo da trattare. Lasciare asciugare e non risciacquare.
AVVERTENZE SICUREZZA				<p>Il liquido imbevuto nella salvietta è facilmente infiammabile. Conservare il prodotto ben chiuso a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Non fumare. Non miscelare con saponi e detergenti anionici, cloruri, carbonati, bicarbonati e altri anioni inorganici, perossido d'idrogeno, paraformaldeide. Evitare il contatto con gli occhi. L'inalazione dei suoi vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Validità confezione originale sigillata: 36 mesi.</p>
PITTOGRAMMI DI RISCHIO	 H225	 H411	 H319 H336	
DPI	Durante l'uso normale del prodotto non sono necessarie protezioni.			

<sup>1</sup> La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.