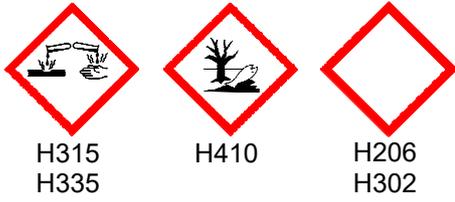


CODICE MAGAZZINO		1074085		
PRINCIPIO ATTIVO		Sodio dicloroisocianurato diidrato (NaDCC) (99%, Cloro disponibile AVCl <sub>2</sub> = 54,45%)		
NOME COMMERCIALE <sup>1</sup>		GIODICLONIL		
INDICAZIONI D'USO				Disinfezione di dispositivi riutilizzabili in plastica e gomma, strumenti, vetreria, superfici pulite e sporche da versamenti di sangue e altre sostanze organiche.
MODALITÀ D'USO				<p>Comprese da 4,6 g solubili in acqua.</p> <p>Per la sanitizzazione e la disinfezione di strumenti e ambienti pre puliti e/o a basso rischio sciogliere una compressa in 10 litri di acqua.</p> <p>Per una disinfezione generale si suggerisce di sciogliere 2 compresse ogni 5 litri di acqua.</p> <p>Per una disinfezione di "alto livello" di strumenti e superfici venuti in contatto con sangue, plasma, feci e altri liquidi biologici contaminati da virus o germi resistenti sciogliere 20 compresse ogni 5 litri di acqua.</p>
AVVERTENZE SICUREZZA				<p>Non mescolare con acidi (formazione di vapori di cloro), sostanze fortemente alcaline, composti ammoniacali, grassi, sostanze ossidabili ecc.</p> <p>Le soluzioni non vanno usate con tessuti di fibre organiche quali lana, seta, ecc.</p> <p>Può causare la decolorazione di alcuni tessuti.</p> <p>Evitare il contatto delle soluzioni concentrate con gli occhi.</p> <p>Far attenzione a non appoggiare le compresse su piani umidi</p> <p>Non disperdere nell'ambiente.</p> <p>La validità delle compresse contenute in barattoli ben tappati e conservati in luogo asciutto e fresco, è di 36 mesi.</p>
PITTOGRAMMI DI RISCHIO				
DPI				
SPANDIMENTO				 <p>Lo spandimento è riferito al prodotto solubilizzato in acqua.</p>

<sup>1</sup> La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.