

CODICE MAGAZZINO		1075194		
PRINCIPIO ATTIVO		Clorexidina gluconato (1,50 g) Cetrimide (15,0 g)		
NOME COMMERCIALE ¹		GIOGLUCOXID		
INDICAZIONI D'USO				<p>Decontaminazione e detersione di strumentario chirurgico e dispositivi medici.</p> <p>Conservazione asettica temporanea dei ferri chirurgici: al momento della rimozione degli strumenti dalla soluzione, prelevarli asetticamente e risciacquarli accuratamente con acqua sterile.</p> <p>Disinfezione e detersione di superfici, dispositivi medici semicritici e non critici costituiti di materiali sensibili alle soluzioni alcoliche come policarbonati e plexiglass.</p>
MODALITÀ D'USO				<p>Soluzione concentrata, da utilizzare solo diluita con acqua di rubinetto.</p> <p>Disinfezione e contemporanea detersione di dispositivi medici, utilizzabile in due diluizioni: 20 ml/L (2%) oppure 40 ml/L (4%).</p> <p>Nel caso della conservazione asettica temporanea dei ferri chirurgici la diluizione corretta è al 4%.</p> <p>Può essere utilizzata anche in vasche a ultrasuoni.</p>
AVVERTENZE SICUREZZA				<p>Conservare il prodotto a temperatura ambiente in luogo asciutto.</p> <p>Evitare il contatto con gli occhi.</p> <p>Non disperdere nell'ambiente.</p> <p>La validità della confezione integra è di 36 mesi.</p>
PITTOGRAMMI DI RISCHIO	  <p>H318 H410</p>		<p>Manipolare con guanti.</p>	
DPI				
SPANDIMENTO				<p>KIT STANDARD Per quantità inferiori al litro</p> <p>KIT AVANZATO  Per quantità superiori al litro</p>

¹ La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.