






CODICE MAGAZZINO		107E4094		
PRINCIPIO ATTIVO		Benzalconio cloruro (0,040), Didecildimetilammoniocloruro (0,060 g), Clorexidina digluconato (0,050 g), Alcool isopropilico (31,0 g), Alcool etilico (31,5 g)		
NOME COMMERCIALE ¹		GIONE RAPIDO		
INDICAZIONI D'USO				Disinfezione e pulizia rapida, efficace e persistente in ambito medico sanitario e odontoiatrico di superfici di dispositivi medici (manipoli, ripiani, portastrumenti, porta pellicole, maniglie delle lampade, lettini operatori, sedie, poltrone, monitor di apparecchiature elettromedicali).
MODALITÀ D'USO				Il prodotto è pronto all'uso e pertanto non richiede alcuna diluizione. Disperdere abbondantemente e diffusamente (talora con l'ausilio di un panno monouso) su superfici e oggetti. Lasciare agire almeno 5 minuti a seconda dello stato di pulizia della superficie (attività virucida, battericida, fungicida e tubercolicida), se necessario asciugare. Non risciacquare con acqua per mantenere un effetto residuo sulle superfici.
AVVERTENZE SICUREZZA				<p>Evitare il contatto con gli occhi. Può provocare sonnolenza o vertigini. Prodotto facilmente infiammabile. Conservare il prodotto ben chiuso a temperatura ambiente, lontano da fiamme e scintille. In seguito ad utilizzo ripetuto può danneggiare plastica e gomma, applicare solo su materiali compatibili con alcool. La validità della confezione integra è di 36 mesi.</p>
PITTOGRAMMI DI RISCHIO	 			
	H225	H319 H336		
DPI			Maneggiare con guanti.	
SPANDIMENTO				<div style="border: 2px solid yellow; padding: 5px; display: inline-block;">KIT STANDARD</div> Per quantità inferiori al litro <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; display: inline-block;">KIT AVANZATO </div> Per quantità superiori al litro

¹ La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.