

CODICE MAGAZZINO		1070104		
PRINCIPIO ATTIVO		Perossido di idrogeno (3 g) N-acetil e O-acetil donatori (60,0 g) Ammina terziaria (4,99 g)		
NOME COMMERCIALE ¹		GIOPERACETIC		
INDICAZIONI D'USO				<p>Disinfezione di alto livello (micobattericida, virucida, fungicida e battericida) di dispositivi medico-chirurgici, soprattutto in ambito odontoiatrico e destinati al contatto con le mucose del cavo orale senza interromperne la continuità (specchietti, sonde, ecc.).</p> <p>Sterilizzazione chimica a freddo (attività sporicida, fungicida, micobattericida, virucida e battericida a temperatura ambiente) di dispositivi medico-chirurgici in particolare quelli usati per scopi terapeutici a livello odontoiatrico (pinze ossivore, pinze da estrazione, curette, ecc.).</p>
MODALITÀ D'USO				<p>Soluzione che non richiede diluizione.</p> <p>Prima dell'uso, aggiungere al generatore la quantità di attivatore contenuto nel flaconcino della confezione. Dopo alcuni minuti dall'attivazione si ottiene acido peracetico in concentrazione sufficiente a garantire l'attività biocida.</p> <p>Disinfezione eseguibile sia manualmente (immersione in vaschetta) sia automatizzata (utilizzo in macchine lavaferri automatiche per apparecchiature endoscopiche).</p>
AVVERTENZE SICUREZZA				<p>Prodotto facilmente infiammabile.</p> <p>Conservare il prodotto a temperatura non superiore a 30 °c, lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere.</p> <p>Le soluzioni d'utilizzo devono essere conservate in bacinelle con coperchio al fine di evitare la dispersione dei vapori.</p> <p>La validità della confezione integra è di 36 mesi.</p>
PITTOGRAMMI DI RISCHIO	 H225		 H302 H315 H320 H335 H336	
DPI			Manipolare con guanti.	
SPANDIMENTO				

¹La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.