



CODICE MAGAZZINO		107E4498		
PRINCIPIO ATTIVO		Didecildimetilammonio cloruro (14 g) Clorexidina digluconato (10 g)		
NOME COMMERCIALE ¹		GIOSEPT FOAM		
INDICAZIONI D'USO			Disinfezione rapida, efficace e persistente, con contemporanea pulizia di: superfici in genere di reparti ospedalieri, piani di lavoro, letti operatori, vetrini per esami istologici, termometri clinici, monitor per ECG e altri monitor touch screen, pompe peristaltiche, respiratori, maschere facciali, lampade scialitiche, poltrone in odontoiatria, poltrone per dialisi, incubatrici o culle termiche in generale, sonde ecografiche, lettini e altri dispositivi medici e apparecchiature biomedicali quali strumentazione per dialisi, contro pulsatori e ventilatori.	
MODALITÀ D'USO			Il prodotto è pronto all'uso. Vaporizzazione sulla superficie oppure su un panno non tessuto pulito e strofinare. Far asciugare e non risciacquare, salvo che la superficie non sia destinata al contatto diretto con le membrane mucose o gli alimenti Tempo minimo di contatto 5 minuti.	
AVVERTENZE SICUREZZA			<p>Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Conservare il prodotto ben chiuso a temperatura ambiente, possibilmente tra 5 e 35 °C. La validità della confezione integra è di 36 mesi.</p>	
PITTOGRAMMI DI RISCHIO				
DPI		Durante l'uso normale del prodotto non sono necessarie protezioni.		
SPANDIMENTO			<p>KIT STANDARD Per quantità inferiori al litro</p> <p>KIT AVANZATO  Per quantità superiori al litro</p>	

¹ La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.