






CODICE MAGAZZINO		1073006INST		
PRINCIPIO ATTIVO		Propionato di N,N-didecil-N-metilpoli(ossietil) ammonio (6,30 g), Clorexidina digluconato (1 g), Sistema enzimatico (amilasi, lipasi, proteasi 3,1 g)		
NOME COMMERCIALE ¹		GIOZYMAX		
INDICAZIONI D'USO				<p>Decontaminazione e contemporanea detersione (pulizia) rafforzata di strumentario medicochirurgico, dispositivi medici e materiale endoscopico</p> <p>Immergere completamente il dispositivo medico, risciacquare accuratamente, asciugare in ambiente pulito.</p> <p>Tempo di contatto minimo: 5 minuti.</p> <p>Decontaminazione in bagno o vasca a ultrasuoni.</p> <p>Raccolta della strumentazione sporca.</p> <p>Detersione in macchine automatiche.</p> <p>Diluizione raccomandata: 0,5% (25 ml in 5 litri d'acqua corrente).</p>
MODALITÀ D'USO				Soluzione concentrata, da utilizzare solo diluita con acqua di rubinetto, acqua deionizzata o acqua distillata nella percentuale dello 0,5% (50 ml per 10 litri d'acqua).
AVVERTENZE SICUREZZA				<p>Evitare il contatto con gli occhi.</p> <p>Non disperdere nell'ambiente.</p> <p>Conservare il prodotto a temperatura ambiente, in luogo asciutto.</p> <p>La validità della confezione integra è di 36 mesi.</p>
PITTOGRAMMI DI RISCHIO	 		H318 H410	
DPI				
SPANDIMENTO				<p>KIT STANDARD Per quantità inferiori al litro</p> <p>KIT AVANZATO  Per quantità superiori al litro</p>

¹ La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.