

INCIDIN® OXYFOAM

**Dispositivo medico classe IIB conforme alla Direttiva 93/42 EEC e
certificato dall'Istituto DQS cod. 0297**

1) DESCRIZIONE PRODOTTO

Detergente - disinfettante innovativo pronto all'uso con Hi-speed H₂O₂TM

2) COMPOSIZIONE

100g di prodotto contengono:

Principi attivi	Perossido di idrogeno	1,5%
Eccipienti	coformulanti q.b.a	100%

3) CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE

Aspetto	Liquido incolore
Peso specifico	1,01 g/ml
pH tal quale	2.2
T di stoccaggio	5°C < T < 25°C




4) PROPRIETA'

L'innovativa formula di Incidin® OxyFoam coniuga i vantaggi di una soluzione pronta all'uso a base di perossido di idrogeno Hi-speed H₂O₂TM brevettata (European Patent EP1987121), con un ampio spettro di azione contro una vasta gamma di batteri, micobatteri, funghi, e virus.

La tecnologia Hi-speed H₂O₂TM, conferisce al prodotto un'azione detergente e disinfettante unica per efficacia e rapidità.

Le proprietà principali sono:

- Hi-speed H₂O₂TM formula brevettata
- Ampio spettro di efficacia
- Brevi tempi di contatto
- Eccellente compatibilità con i materiali
- Sicurezza garantita per l'utilizzatore, il principio attivo si decompone in acqua e ossigeno
- Rispetto della Normativa EN 16615

TEST DI EFFICACIA		
Disinfezione delle superfici in accordo con VAH metodo 2015		
Condizioni di sporco (battericida, levuricida)		5 min
(fungicida)		5 min
(micobattericida)		15 min
Condizioni di pulito & sporco		
EN 13727 (tuberculocida, micobattericida)		15 sec
EN 13624 (battericida, levuricida)		1 min
EN 13624 (fungicida)		5 min
EN 14348 (tuberculocida, micobattericida)		5 min
Condizioni di sporco		
EN 16615 (battericida, levuricida)		15 sec
EN 16615 (fungicida)		5 min
EN 16615 (tuberculocida, micobattericida)		15 min
Efficace contro virus incapsulati in acc. alla raccomandazione 1/2004 del RKI*		15 sec
Adeno*		1 min
Polyoma SV40*		30 sec
Rota*		30 sec
EN 14476 Adeno (Condizioni di pulito & sporco)		30 sec
EN 14476 Noro (Condizioni di pulito & sporco)		15 min
EN 14476 Rota (Condizioni di pulito)		30 sec

* DVV 2015 (test di sospensione)

Non lascia residui attivi sulle superfici, scomponendosi semplicemente in acqua e ossigeno senza alcun residuo tossico, non richiede etichettature di pericolo (secondo norme CLP).



5) MECCANISMO DI AZIONE

La combinazione con tensioattivi altamente specifici del prodotto Incidin® OxyFoam con Hi-speed H₂O₂TM, permette al perossido d'idrogeno di entrare più velocemente nei microorganismi, sinergizzando le sue caratteristiche di forte ossidante antimicrobico con conseguente riduzione dei tempi di contatto, a concentrazioni d'uso nettamente inferiori (1-1,5%) rispetto al perossido standard (≈ 8%).

6) CAMPO DI APPLICAZIONE

Incidin® OxyFoam è una schiuma spray pronta all'uso, specificatamente indicata per la pulizia e la disinfezione delle superfici di dispositivi medici come monitor touch screen, microscopi, lampade, manipoli, smartphone, tablet, ecc., in ambiente ospedaliero e studi odontoiatrici.

Adatto per la pulizia e disinfezione di sonde ed incubatrici, non adatto per la disinfezione finale di dispositivi medici invasivi.

7) MODALITA' DI UTILIZZO

Incidin® OxyFoam è un prodotto pronto all'uso. Applicare la schiuma detergente/disinfettante direttamente sulla superficie, da una distanza di circa 30 cm, oppure su una salvietta pulita. Strofinare distribuendo il prodotto sull'intera superficie da trattare. Lasciare asciugare. Non risciacquare. I neonati ed in particolare i neonati prematuri rappresentano un gruppo altamente vulnerabile e sensibile, quindi, il contatto di questi con qualsiasi ingrediente del prodotto dovrebbe essere evitato. Si raccomanda una pulizia finale della superficie delle incubatrici con acqua/panno umido pulito dopo la disinfezione per rimuovere eventuali residui di prodotto.

8) COMPATIBILITA' CON I MATERIALI

Incidin® OxyFoam presenta un'elevata compatibilità con i materiali, ed è stato testato positivamente su molteplici tipologie di superfici e dispositivi medici.

METALLI	Acciaio INOX : - V2A, - V4A, - 316 L Titanio grado 2
PLASTICHE	Polyethylene (PE), Polyvinylchloride (PVC), Polyamide (PA), PMMA (Polymethylmethacrylat), Polypropylene (PP), PC (Polycarbonate), ABS (Acrylic-nitrilbutadien-styrene), PS (Polystyrene), PSU (Polysulfone), PC/ABS
CERAMICHE	Piastrelle smaltate

Non applicare su superfici sensibili agli agenti ossidanti come marmo, rame ed ottone.



9) CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato nei contenitori originali a meno di 25°C in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

La validità del prodotto è di 2 anni, se tenuto in confezione integra e correttamente conservato. La stabilità del prodotto dopo la prima apertura, equivale alla sua validità totale.

10) SMALTIMENTO

I contenitori vuoti o eventuali recipienti possono contenere residui di prodotto, pertanto vanno smaltiti in modo sicuro. Informazioni più dettagliate possono essere consultate nella sezione 13 della scheda di sicurezza.

11) PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Usare Incidin® OxyFoam in condizioni sicure – leggere sempre le etichette e le informazioni sui prodotti prima dell'uso.

Solo per uso professionale.

12) TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO

Il flacone è costituito da polietilene ad alta densità (HDPE). Lo switch (ON/OFF) presente sull'erogatore applicato ad ogni confezione, protegge il prodotto da eventuali manomissioni prima del suo impiego.

Codice	Imballo primario	Imballo secondario
3082160	Flacone da 750ml	Cartone da 6 flaconi da 750ml

13) AUTORIZZAZIONI E CERIFICAZIONI

Tipologia	Numero identificativo	Altre indicazioni	Ente
CND	D05599 - Ossigenoproduttori	Cod. prodotto 3082160	Ministero della Salute
Numero di repertorio	1362195/R	Cod. prodotto 3082160	Ministero della Salute

14) ALTRE INFORMAZIONI

• Dichiarazione LATEX-Free:

Con riferimento a documento interno del 07/07/2016 (Monheim am Rhein), si dichiara che il presente prodotto non contiene LATEX né nelle materie prime componenti la formulazione né nel packaging. Ecolab non aggiunge intenzionalmente LATEX in nessuno step del processo produttivo.

Ecolab S.r.l.

Via Trento 26

I – 20871 Vimercate (MB)

Tel. 0396050.1 Fax 0396050.573

Scheda Tecnica: Incidin® OxyFoam

Data: 08/03/2019

Revisione n°: 6