

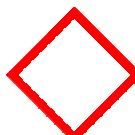





CODICE MAGAZZINO		107E650TER		
PRINCIPIO ATTIVO		Benzalconio cloruro (6 g), Didecilammonio cloruro(6 g), tensioattivi non ionici (3,2 g), Proteasi (0,2), Lipasi (0,1 g), Amilasi (0,1 g)		
NOME COMMERCIALE ¹		LH ENZYCLEAN SPRAY		
INDICAZIONI D'USO				<p>Detersione e disincrostazione con rapida azione battericida per dispositivi medici, strumenti chirurgici, attrezzature ospedaliere ed ambulatoriali.</p> <p>Detersione e contemporanea disinfezione di strumenti contaminati prima della sterilizzazione e/o per evitare la diffusione di microrganismi durante la raccolta di materiali infetti.</p>
MODALITÀ D'USO				<p>Soluzione pronta all'uso</p> <p>Nebulizzare in modo uniforme gli strumenti e le attrezzature da trattare accertandosi che il prodotto penetri in tutte le cavità. Quindi risciacquare con acqua prima di procedere alla pulizia e alla disinfezione del dispositivo.</p> <p>Tempo di contatto : 10 min. Attivo contro i batteri dopo 5 min.</p>
AVVERTENZE SICUREZZA				<p>Provoca grave irritazione oculare.</p> <p>Non disperdere nell'ambiente.</p> <p>La validità della confezione integra è di 2 anni.</p>
PITTOGRAMMI DI RISCHIO	  <p>H319 H412</p>			
DPI	   <p>Manipolare con guanti. Indossare occhiali protettivi in caso di possibile contaminazione oculare. Indossare il camice durante l'utilizzo.</p>			
SPANDIMENTO				<p>KIT STANDARD Per quantità inferiori al litro</p> <p>KIT AVANZATO Per quantità superiori al litro</p>

¹ La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.