
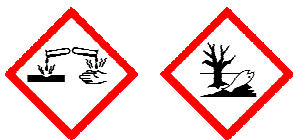



CODICE MAGAZZINO		1074416		
PRINCIPIO ATTIVO		o-benzil-p-clorofenolo (7,5 g) o-fenilfenolo(10 g) p-tert-amilfenolo (2 g)		
NOME COMMERCIALE ¹		LH FEN CONCENTRATO		
INDICAZIONI D'USO				Decontaminazione strumenti chirurgici e dispositivi medici. Disinfezione e detersione a freddo di superfici e dispositivi medici invasivi e non invasivi in campo sanitario e laboratoristico.
MODALITÀ D'USO				Emulsione concentrata. Per la decontaminazione utilizzare diluito allo 0,4% con tempo di immersione di 30 minuti, oppure all'1% immergendo per 10 minuti. Per la disinfezione usare diluito al 4% con tempo di contatto tra i 10 e i 30 minuti massimo. Applicare l'emulsione diluita e trattare le superfici, non risciacquare.
AVVERTENZE SICUREZZA				Provoca ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Non disperdere nell'ambiente Conservare il prodotto nella confezione originale in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo da elevate fonti di calore e non esposto a luce solare diretta.
PITTOGRAMMI DI RISCHIO	 H290 H314 H411			
DPI	 Manipolare con guanti. Indossare occhiali protettivi in caso di possibile contaminazione oculare. Indossare il camice durante l'utilizzo.			
SPANDIMENTO				KIT STANDARD Per quantità inferiori al litro KIT AVANZATO Per quantità superiori al litro

¹ La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.