




CODICE MAGAZZINO		1075126	
PRINCIPIO ATTIVO		Miscela enzimatica(2%), Tensioattivo non ionico(43%), Tensioattivo anionico (10%)	
NOME COMMERCIALE ¹		NEOGIOZYM	
INDICAZIONI D'USO			<p>Lavaggio e/o detersione degli articoli medico-chirurgici (strumentario, cateteri e sonde, strumenti a fibre ottiche, apparecchi per anestesia, terapia inalante, emodialisi, endoscopia, urologia) in ambito ospedaliero e negli ambulatori medici e odontoiatrici, prima delle operazioni di disinfezione e/o sterilizzazione.</p> <p>Può essere utilizzato anche per il lavaggio e detersione con apparecchi a ultrasuoni e/o in macchine lavaferri, lavaendoscopi e lavastrumenti meccanici e rotative.</p>
MODALITÀ D'USO			<p>Soluzione concentrata a basso potere schiumogeno da utilizzare solo diluita con acqua di rubinetto a temperature anche basse (5-10 °c) nella percentuale dello 0,15% (1,5 ml per litro d'acqua).</p> <p>Per il lavaggio manuale o con vasche a ultrasuoni usare 15 ml per 10 litri d'acqua di rubinetto e lasciare in immersione per 10 minuti (nel caso di vasche a ultrasuoni 5 minuti).</p> <p>In presenza di residui organici molto consistenti ed essiccati, raddoppiare il tempo d'immersione e la diluizione.</p>
AVVERTENZE SICUREZZA			<p>Provoca irritazione cutanea. Evitare il contatto con gli occhi. Conservare il prodotto a temperatura ambiente in luogo asciutto. La validità della confezione integra è di 36 mesi.</p>
PITTOGRAMMI DI RISCHIO	 H315 H319		
DPI			
SPANDIMENTO			<p>KIT STANDARD Per quantità inferiori al litro</p> <p>KIT AVANZATO Per quantità superiori al litro</p>

¹ La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.