

CODICE MAGAZZINO		10794654	
PRINCIPIO ATTIVO		Cloruro di alchil-dimeti-ammonio 0,4 g Cloruro di dedecildimetilammonio 0,2 g	
NOME COMMERCIALE ¹		CLEANISEPT FORTE	
INDICAZIONI D'USO		Disinfezione e pulizia dei dispositivi medici sensibili all'alcool.	
MODALITÀ' D'USO		Pulire le superfici con le SALVIETTE CLEANISPT FORTE fino a completa bagnatura e lasciar asciugare per tutto il tempo di contatto (il tempo di contatto è variabile e può essere verificato nella scheda tecnica)	
AVVERTENZE SICUREZZA		<p>Non disperdere nell'ambiente.</p> <p>Evitare che il prodotto venga a contatto con gli occhi e con la cute.</p> <p>Conservare i contenitori ben chiusi in ambiente ventilato.</p> <p>Incompatibile con sostanze acide.</p> <p>La validità della confezione integra è di 3 anni.</p>	
PITTOGRAMMI DI RISCHIO	 H412		
DPI			
		<p>Manipolare con i guanti.</p> <p>Indossare occhiali protettivi in caso di possibile contaminazione oculare.</p>	

¹ La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.