

Salviette disinfettanti

SALVIETTE CLEANISEPT® FORTE



Salviette senza alcool per una rapida disinfezione

- Applicazione universale, comoda e rapida dotata di un pratico dispenser
- Efficacia ampia e rapida
- Per la disinfezione virucida delle sonde ad ultrasuoni per esami transvaginali ed addominali

Descrizione del prodotto

Le **SALVIETTE CLEANISPT FORTE** sono senza alcool, pronte all'uso per la rapida disinfezione virucida e per la pulizia dei dispositivi e della strumentazione medici. Le **SALVIETTE CLEANISPT FORTE** consente un'applicazione pratica e che consente di risparmiare tempo, in particolare per la disinfezione virucida e la pulizia delle sonde ad ultrasuoni. Le salviette sono prive di alcool, aldeidi e fenoli. Le salviette possono essere estratte individualmente da una scatola dispenser richiudibile.

Le **SALVIETTE CLEANISPT FORTE** sono a base di una soluzione di ammollo comoda. Il prodotto è inodore e presenta un'ottima compatibilità con i materiali, ma offre anche un'efficacia ampia e veloce.

Campo di applicazione

Secondo il regolamento UE sui dispositivi medici: per una disinfezione e una pulizia rapide dei dispositivi medici sensibili all'alcool.

Applicazione

Pulire le superfici con le **SALVIETTE CLEANISPT FORTE** fino a completa bagnatura e lasciar asciugare per tutto il tempo di contatto.

Secondo il regolamento UE sui dispositivi medici, gli utenti/pazienti sono obbligati a segnalare al produttore e all'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui risiedono qualsiasi incidente grave che si è verificato in relazione al dispositivo.

Descrizione dell'applicazione

Durante il ricondizionamento delle sonde a ultrasuoni, devono essere osservate le norme igieniche di base (soprattutto l'uso di dispositivi di protezione individuale, ambiente di lavoro con adeguate misure igieniche, disinfezione igienica delle mani).

Pre-pulizia: dopo aver rimosso il tappo protettivo, la sonda di disinfezione deve essere pulita con un panno monouso commercialmente disponibile, privo di germi e pelucchi, immerso precedentemente in acqua. Con il panno in mano, avvolgere la sonda e pulirne le superfici in modo uniforme
IT 05/2021

Spettro di efficacia e tempo di contatto			1 min.	2 min.	15 min.	30 min.
Raccomandazione di applicazione per la disinfezione delle superfici: battericida, lieviticida*	VAH** / EN 16615	con azione meccanica, condizioni di sporco	•			
Virus						
Virucida	EN 14476	condizioni di sporco	•			
	RKI/DVV	incl. polio-, adeno-, norovirus e SV40/papova-/polyomavirus		•		
attivo contro i poliomavirus / SV40	EN 16615 / prova pratica del vettore	condizioni di pulito		•		
Risultati dei test aggiuntivi						
battericida	EN 16615	condizioni di sporco	•			
	EN 13727	condizioni di sporco	•			
lieviticida	EN 16615	condizioni di sporco	•			
	EN 13624	condizioni di sporco	•			
fungicida (Aspergillus brasiliensis)	EN 13624	condizioni di pulito				•
virucida	EN 16777	condizioni di pulito		•		

*inclusi i test di fase 2, fase 1 e fase 2 (test quantitativi in sospensione e test quantitativi sui vettori)

**elencati nella colonna 5 min dell'elenco VAH

Dr. Schumacher

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germania
Tel.: +49 5664 9496-0 · www.schumacher-online.de



Salviette disinfettanti

SALVIETTE CLEANISEPT® FORTE

Salviette senza alcool per una rapida disinfezione

5 volte applicando una leggera pressione. Assicurarsi che la superficie sia completamente bagnata. Successivamente asciugare la sonda con un ulteriore panno usa e getta. Smaltire il panno.

Pulizia: rimuovere una salvietta **CLEANISEPT FORTE** dalla confezione e aprirla con la mano aperta. Pulire tutte le superfici, inclusa la maniglia, chiudendo la mano attorno alla sonda e strofinando uniformemente la superficie 5 volte applicando una leggera pressione. Assicurarsi che la superficie sia completamente bagnata. Smaltire la salvietta.

Disinfezione: rimuovere una seconda salvietta **CLEANISEPT FORTE** dalla confezione e aprirla con la mano aperta. Disinfettare tutte le superfici, compresa la maniglia, chiudendo la mano attorno alla sonda e strofinando uniformemente la superficie 5 volte esercitando una leggera pressione.

Assicurarsi che la superficie sia completamente bagnata. Lasciare le sonde esposte alla soluzione disinfettante della salvietta per almeno 2 minuti. Smaltire la salvietta.

Note applicative

Periodo di validità dopo l'apertura: 28 giorni.

Composizione

100 g di soluzione contengono:
0,4 g di cloruro di alchil-(C12-16) dimetil-ammonio,
0,2 g di cloruro di didicildimetilammonio

Compatibilità dei materiali

Si consigliano le **SALVIETTE CLEANISEPT FORTE** per la disinfezione delle sonde ad ultrasuoni per esami addominali e transvaginali dei seguenti produttori:

- Esaote GmbH, Köln
- Siemens Medical Solutions, Erlangen

Opinioni degli esperti

Disponiamo di ampi rapporti di esperti per tutti i nostri prodotti. Su richiesta, siamo lieti di fornirli Unitamente a un portfolio di rapporti di esperti.

Dichiarazioni di precauzione e pericolo

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata. Evitare il rilascio nell'ambiente.


IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e sei l'operazione è facile da fare. Continuare a sciacquare.

Far smaltire il contenuto/contenitore da una società di smaltimento o raccolta locale approvata.

Solo per uso professionale.

CE 0482


PRE-PULIZIA

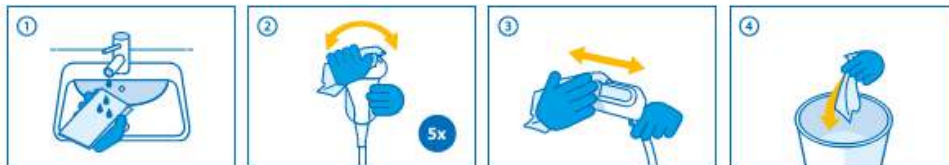

PULIZIA



DISINFEZIONE

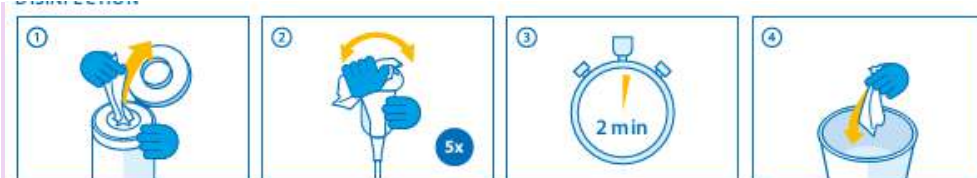

ASCIUGATURA

