






CODICE MAGAZZINO		C438AZ9216		
PRINCIPIO ATTIVO		100 ml di prodotto contengono: 0,5 grammi di didecil-dimetil ammonio cloruro; 0,06 grammi clorexidina di gluconato; 70 ml alcol etilico DS, coformulanti ed acqua q.b. a 100		
NOME COMMERCIALE <sup>1</sup>		DUOXIL AC		
INDICAZIONI D'USO				Disinfettante pronto all'uso per dispositivi medici riutilizzabili, di tipo invasivo e non, superfici di dispositivi medici esposte al pericolo di contaminazione microbiologica in campo sanitario. Superfici esterne di attrezzature mediche chirurgiche, letti e poltrone bilancia, computer dedicati ad attrezzature mediche, tastiere, unità periferiche, scrivanie, tavoli tecnici, terminali di apparecchiature tecniche, parti non invasive ed invasive, compatibili, di strumenti elettromedicali e di laboratorio biomedico.
MODALITÀ D'USO				Duoxil AC si impiega tal quale, spruzzandolo sulla superficie da trattare, se priva di anfratti e discontinuità, o su panno idoneo con il quale intervenire sulle superfici da disinfettare, nel passaggio finale usare panno pulito e lasciare asciugare. Tempi di contatto: 10 minuti.
AVVERTENZE SICUREZZA				
PITTOGRAMMI DI RISCHIO	 H225	 H319	Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso, in un luogo riparato e lontano da fonti di calore. Non disperdere nell'ambiente. La validità della confezione integra è di 12 mesi.	
DPI			Durante l'uso normale del prodotto non sono necessarie protezioni. Utilizzare guanti sanitari in caso di contatto prolungato.	
SPANDIMENTO				<div style="border: 2px solid yellow; padding: 5px; display: inline-block;"><b>KIT STANDARD</b></div> Per quantità inferiori al litro <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; display: inline-block;"><b>KIT AVANZATO</b> </div> Per quantità superiori al litro

<sup>1</sup> La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore.